



El dolor, la cojera y las dificultades motoras ya no son un problema: el protector para el jarrete BT Hock es la solución ideal para ayudar a resolver las lesiones del jarrete. El protector tiene tres bolsillos para meter dos férulas laterales rígidas y una férula delantera ajustable. Se usa en enfermedades que provocan lesiones en la zona del jarrete, causando síntomas como dolor, cojera o dificultades de movimiento. El protector, si se usa sin férulas, también es útil en caso de enfermedades como artritis o artrosis. De hecho, el efecto compresor del material del que está compuesto aumenta la presión de la sangre en la zona, aumentando así la temperatura y reduciendo el dolor que provocan las enfermedades. La férula delantera se aconseja para aquellos casos en los que sea necesario bloquear por completo la articulación del jarrete (por ejemplo, tras una operación o una causa de problemas neurológicos). También se utiliza con fines de protección, puede contener emplastos o vendajes con cualquier medicamento en caso de heridas quirúrgicas o úlceras de decúbito. También es excelente tras una intervención quirúrgica.

VENTAJAS

Efecto estabilizador y reductor de la carga: así es cómo el protector para el jarrete BT Hock contribuye a una recuperación funcional rápida previniendo daños secundarios. La acción protectora mejora el funcionamiento de los ligamentos atenuando el dolor. La menor carga alivia la parte lesionada ayudando a reducir el malestar y, en algunos casos, la hinchazón. El todo sin impedir al perro los movimientos normales y garantizando una flexión óptima y flexibilidad de los músculos, mientras los ligamentos se mantienen contraídos. Las férulas rígidas están pensadas para el bloqueo de la extremidad del perro a la altura del jarrete tras una intervención quirúrgica.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tejido transpirable.
- ▶ Lavable a mano.
- ▶ Comodidad.
- ▶ Se puede utilizar tanto antes como después de la operación.
- ▶ Ya hay dos férulas laterales rígidas y una férula delantera ajustable en el protector.
- ▶ Las férulas se pueden retirar sacándolas de los bolsillos.
- ▶ La férula delantera es ajustable.

RECOMENDACIONES DE USO

- ▶ Durante el periodo obligatorio se aconseja no dejar al perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar quitarse el protector, mordiéndolo o arañándolo.
- ▶ **Atención:** si se saca al perro a correr o a jugar mientras lleva el protector, este último puede causarle enrojecimientos por el roce debido al contacto directo de las férulas rígidas con la piel. Recomendamos prevenirlo introduciendo una gasa o un poco de algodón entre las férulas rígidas y la piel del perro.
- ▶ Consulte al veterinario en caso de utilizar férulas en el protector.
- ▶ Retirar las férulas antes de cada lavado.

TALLAS

Producto disponible en cinco tallas ajustables



* La talla XXS se aconseja para chihuahuas y perros con 2-5 kg de peso.

