



Las enfermedades que afectan a la articulación de la rodilla requieren soluciones eficaces: BT Jump es la respuesta. Es una ayuda ortopédica estudiada para casos de problemas en el ligamento cruzado, luxación de la rótula y de enfermedades de la articulación como artritis, artrosis, varo y valgo. Este protector ortopédico es óptimo también como alternativa válida a una intervención quirúrgica o como un soporte postoperatorio excelente. BT Jump, dispone de bolsillos laterales con dos listones de aluminio doblados que limitan el movimiento de la articulación cuando es necesario. La banda abdominal garantiza una sujeción excelente alrededor del perro. El protector, si se usa sin férulas también es útil en caso de patologías como artritis o artrosis. De hecho, el efecto compresor del material del que está compuesto aumenta la presión de la sangre en la zona, aumentando así la temperatura y reduciendo el dolor que provocan las enfermedades.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ El protector ortopédico se puede utilizar tanto antes como después de la operación.
- ▶ Tejido transpirable.
- ▶ Comodidad.
- ▶ Lavable a mano.
- ▶ Bandas ajustables.

### RECOMENDACIONES DE USO

- ▶ Durante el periodo obligatorio es aconsejable no dejar al perro solo durante mucho tiempo, porque podría intentar quitarse el protector, mordiéndolo o arañándolo.
- ▶ En algunos casos vuestro perro o gato puede tardar una o dos semanas a habituarse al protector. Aconsejamos utilizar el protector de este modo: el primer día alrededor de 30 minutos, y progresivamente ir aumentando cada día 30 minutos mas hasta llegar a 8 horas al día de su propio utilizo, y quitar el protector durante la noche. Seguir siempre las indicaciones de vuestro veterinario si son diferentes de los consejos que se citan aquí.