



BT Neck Eco nace como alternativa al clásico collar isabelino, lo supera con prestaciones excelentes uniendo eficacia y máximo confort. Su función es evitar que el perro o el gato pueda morder y, en consecuencia, quitarse los puntos de sutura tras una intervención quirúrgica. También es útil en los casos de trastornos obsesivo-compulsivos. El collar está hecho de terciopelo negro transpirable, donde tiene dentro un material más rígido cuya función es la de impedir que el animal gire el cuello para llegar a las posibles heridas. Se evita que el perro lama la zona del tórax, del vientre y de los laterales, lo que hace más difícil que llegue a las zonas cercanas a la pata delantera (del codo al hombro). También se protege la zona perianal, implicada en algunas intervenciones de extracción de glándulas, fistulas u otros. En el gato es útil exclusivamente tras intervenciones de esterilización, ya sea macho o hembra.

**N.B.: este collar tiene solo una función antilametones.** En el caso en el que el animal sufra problemas cervicales, aplastamiento de las vértebras o problemas neurológicos, el protector idóneo es el collar rígido ortopédico BT Neck para gatos y perros de raza chihuahua o parecidos.

### VENTAJAS

Mayor practicidad en la aplicación y menor invasión respecto al collar isabelino (el perro puede comer y beber sin obligaciones).

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tejido transpirable pero no impermeable.
- ▶ Se puede utilizar el protector tanto antes como después de la operación.
- ▶ Comodidad.
- ▶ Lavable a mano.

### RECOMENDACIONES DE USO

- ▶ El collar BT Neck Eco no está indicado para galgos y bulldogs. El cuello largo de los galgos no permite que haya estabilidad en el protector, mientras que el cuello corto y fornido del bulldog no permite el uso de collares.
- ▶ Para una utilización correcta y evitar que se gire, es importante que el collar esté bien ajustado al cuello.
- ▶ Durante el uso del collar rígido, se puede llevar a pasear al perro utilizando el collar o el arnés.
- ▶ En el transcurso de las 24 horas, quitar el collar durante 1 o 2 horas.
- ▶ El collar no es de utilidad en caso de intervención en las patas delanteras (desde el codo a la pata).

### TALLAS

Disponibles en seis tallas ajustables. Para determinar la talla correcta, tomar la medida de la circunferencia del cuello del perro con un metro de sastre (medir en el centro del cuello).



Talla	Circunferencia del cuello
XXS	Medida para Gatos y Chihuahua
XS	25-35 cm
S	35-45 cm
M	45-55 cm
L	55-65 cm
XL	65-75 cm